

AProof®

CORONAVIRUS ANTIKÖRPERTEST

Mit dem **AProof®** Coronavirus Antikörpertest erhalten Sie ein Testset zur eigenständigen Probenentnahme für eine Laboranalyse auf IgG-Antikörper des Coronavirus Sars-CoV-2. IgG-Antikörper dienen als Hinweis auf eine überstandene Infektion und können frühestens nach 10 bis 14 Tagen im Blut nachgewiesen werden.

ABLAUF

1) Kauf

Testset in der Apotheke kaufen. Die Analysekosten sind mit dem Kaufpreis bezahlt.

2) Probennahme

Mit beiliegender Lanzette Blutprobe aus der Fingerkuppe entnehmen und mindestens zwei Felder der Filterpapierkarte vollständig betropfen.

3) Versand

Abrufkarte behalten und Filterkarte im Rücksendeumschlag (kostenfrei innerhalb Deutschlands) einsenden.

INHALT

- 2× automatische Lanzette
- 1× Filterpapierkarte
- 1× Abrufkarte
- 1× Desinfektionstuch
- 2× Wundpflaster
- 1× Tupfer
- 1× Papiertüte und
- 1× Rücksendeumschlag

Adversis Pharma
Your companion in innovative diagnostics

PZN: 16783257

EAN: 4260706840003


Sie erhalten ein Set zur eigenständigen Probenentnahme aus der Fingerkuppe Zuhause und Einsendung in unser Fachlabor, wo die Analyse auf Sars-CoV-2 IgG-Antikörper per zertifiziertem ELISA Verfahren durchgeführt wird. Das Ergebnis ist nach Registrierung auf unserer Webseite online abrufbar und kann ausgedruckt werden.

4) Aktivierung

Kundenkonto auf www.aproof-corona.de erstellen und Antikörpertest mit persönlicher Test-ID registrieren.

5) Ergebnis

Die Auswertung erfolgt im Regelfall innerhalb von 48h / 2 Arbeitstagen nach dem Probeneingang im Labor. Status und Ergebnis können unter www.aproof-corona.de abgerufen werden.

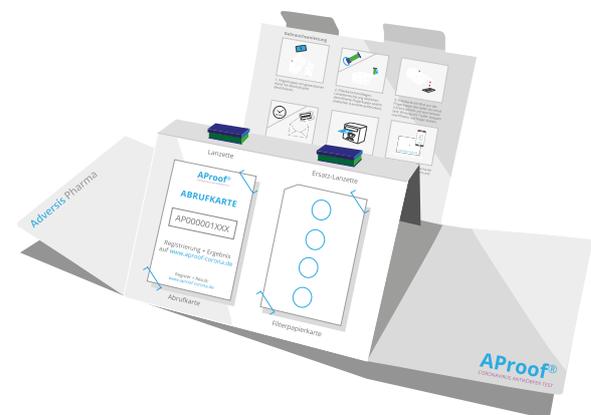

AProof® Probenahme-Set für die Laboranalyse
mit allen notwendigen Dokumenten und
Materialien zur Probenahme

DAS TESTSET

Im **AProof®** Probenahme-Set sind alle Komponenten enthalten, die Sie brauchen, um sich eine Blutprobe aus der Fingerkuppe zu entnehmen und kostenfrei an das eigene **AProof®**-Labor zurückzusenden. Die eingesandte Filterkarte mit der Blutprobe wird dort auf Antikörper gegen das SARS-CoV-2 Coronavirus getestet.

VORTEILE APROOF®


- Probenahme zu jeder Zeit selbständig Zuhause
- Geringste Blutmengen genügen, Filterpapierkarte statt Blutröhrchen
- Hohe Zuverlässigkeit des Tests – vergleichbar mit der Probenahme beim Arzt
- Analyse im eigenen Labor
- Ärztlicher Befund durch Fachärzte
- Ergebnis innerhalb von 24-48 Stunden nach Probeneingang abrufbar
- Ergebnisabruf online zu jeder Zeit
- Servicehotline für Beratung und Fragen

WARUM AUF ANTIKÖRPER TESTEN?


- Vorhandene Antikörper bedeuten geringeres Risiko einer Neuinfektion
- Vorhandene Antikörper bedeuten geringeres Risiko einer schweren Erkrankung
- Mehr Sicherheit im Umgang mit Familie, Freunden und Kollegen




ANWENDUNG UND GEBRAUCH

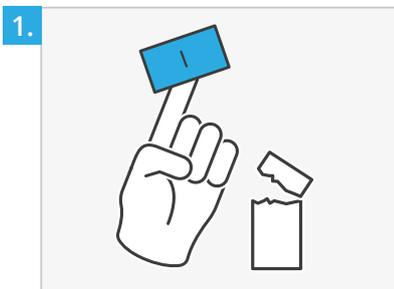


1. Fingerkuppe von gewaschener Hand mit Alkoholtupfer desinfizieren.

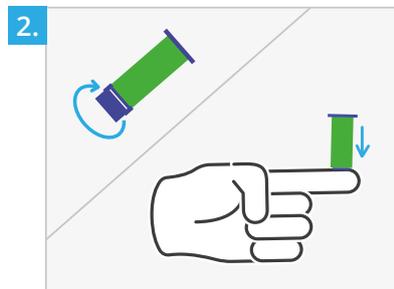


2. Filterkarte bereitlegen, Lanzettensicherung abdrehen, desinfizierte Fingerkuppe seitlich anstechen (Lanzette aufdrücken).

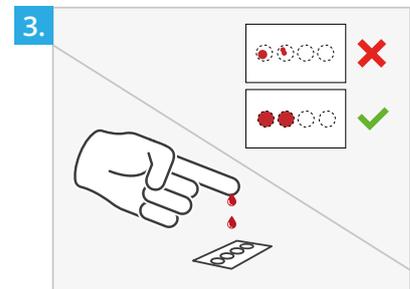

3. Filterkarte mit Blut aus der Fingerkuppe betropfen, bis **mind. 2 Kreise befüllt und durchtränkt** sind. Blutung mit Tupfer stoppen und Pflaster auf Finger kleben.

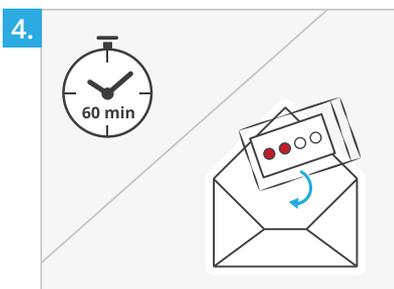

4. Filterkarte für **mindestens 60 Minuten** trocknen lassen, dann zuerst in die Papiertüte und anschließend in den beiliegenden Rückumschlag packen.

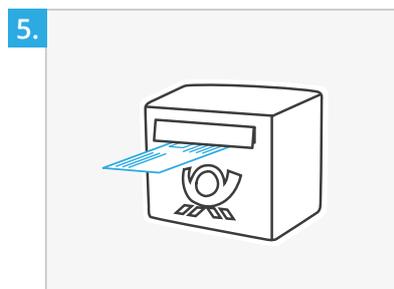

5. Absender auf Rückumschlag ausfüllen und in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Versand innerhalb Deutschlands portofrei.



6. Unter www.aproof-corona.de mit Abrufkarte registrieren und Ergebnis ca. 1-2 Arbeitstage nach Laboreingang abrufen.